

# BioBulk Fill con Biodentine

## Recubrimiento pulpar indirecto

Caso cortesía del Dr. Subir Banerji, Londres, Reino Unido

El recubrimiento pulpar indirecto está indicado en aquellos dientes que presenten caries muy cercanas a la pulpa. Esta puede ser asintomática o bien presentar signos o síntomas de pulpitis reversible. Biodentine presenta propiedades similares a la dentina, ofreciendo la posibilidad de rellenar la cavidad en un único incremento (BioBulk Fill) y también de actuar como restauración temporal durante los siguientes 6 meses para poder controlar la vitalidad pulpar antes de realizar la restauración final en composite, que se unirá a Biodentine como si fuera dentina natural.



Caries profunda en el diente 14, diente asintomático y sin cambios periapicales.



Se accede y se elimina el tejido cariado, dejando una cavidad profunda sin exposición pulpar.



Se aplica Biodentine como material de BioBulk Fill. Después de dos semanas, los primeros milímetros se sustituirán por un composite.



Imagen clínica en la visita de seguimiento al cabo de dos años.



[www.septodont.es](http://www.septodont.es)